

Klovbeskæringsboks Std 1

Brugervejledning



POMI Industri ApS

Abildvadvej 5, Thorup, DK-9610 Nørager

Tlf. +45 98 55 20 00, Fax +45 98 55 22 00, Mobil +45 40 34 20 10

E-mail: pomi@pomi.dk - Hjemmeside: www.pomi.dk

Indholdsfortegnelse

1.	POMI KLOVBESKÆRINGSBOKS	3
2.	SIKKERHEDSINFORMATION	3
3.	EU-OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING	4
4.	MASKINENS IDENTIFIKATION	5
5.	FUNKTIONER	6
5.1.	HØJRE SIDE AF BOKSEN	6
5.2.	VENSTRE SIDE AF BOKSEN	7
5.3.	BAGENDE AF BOKSEN	8
6.	SÅDAN FUNGERER KLOVBESKÆRINGSBOKSEN	9
6.1.	KLAR TIL KLOVBESKÆRING	9
6.2.	KLOVBESKÆRING	9
7.	RENGØRING	10
8.	VEDLIGEHOLD	10
8.1.	SKIFT SLIDT REB - FORBENSHOLDER	10
8.2.	SKIFT SLIDT REB - MANCHET TIL BAGBEN	11
9.	TEKNISKE DATA	12
10.	EKSTRA Udstyr	12

Opdateret den 17.01.19

1. Pomi Klovbeskæringsboks

Du har valgt en klovbeskæringsboks fra POMI, den må bruges til kreaturer.

Hvis den skal bruges til andet, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra fabrikanten.

POMI Industri ApS fritager sig for ethvert ansvar for skader på fødder / klove.

2. Sikkerhedsinformation

AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED

- **Bær beskyttelsesbriller under klovbeskæring.**
- **Det er forbudt for uvedkommende at komme inden for en afstand på 10 m fra maskinen, når den er i drift, dels fordi**
 - **der kan komme pludselig bevægelser fra kreaturet.**
 - **der kan sprøjte olie fra en beskadiget slange.**
 - **der kommer klovdele flyvende.**

3. EU-Overensstemmelseserklæring

Fabrikant: POMI Industri ApS
Abildvadvej 5, Thorup
DK-9610 Nørager
Tlf. +45 98 55 20 00

Firma

Erklærer hermed, at

Maskine: Klovbeskæringsboks Std 1
Mærke

_____ serie nr., år

er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets Direktiv af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EØF) som ændret den 20/6 91 (91/368/EØF) (93/44/EØF) og (93/68/EØF), under særlig henvisning til direktivets bilag I om væsentlige sikkerheds og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner.

Herunder navnlig:

er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserende standarder (Direktivets art. 5, stk. 2)

er fremstillet i overensstemmelse med andre standarder og/eller tekniske bestemmelser.

Underskrift

Dato

Poul Mikkelsen
Direktør
POMI Industri ApS

4. Maskinens identifikation

Ved bestilling af reservedele bedes serienummer oplyst. Det findes på maskinens højre side, som vist på nedenstående billede.



Serie nr. _____

Fabrikationsår _____

5. Funktioner

5.1. Højre side af boksen




1

2

3


1. Tænd.
2. Sluk/Nødstop.
3. Hæve/sænke højre forbensholder (Overtryksventil indstilles til 90 bar).

5.2. Venstre side af boksen

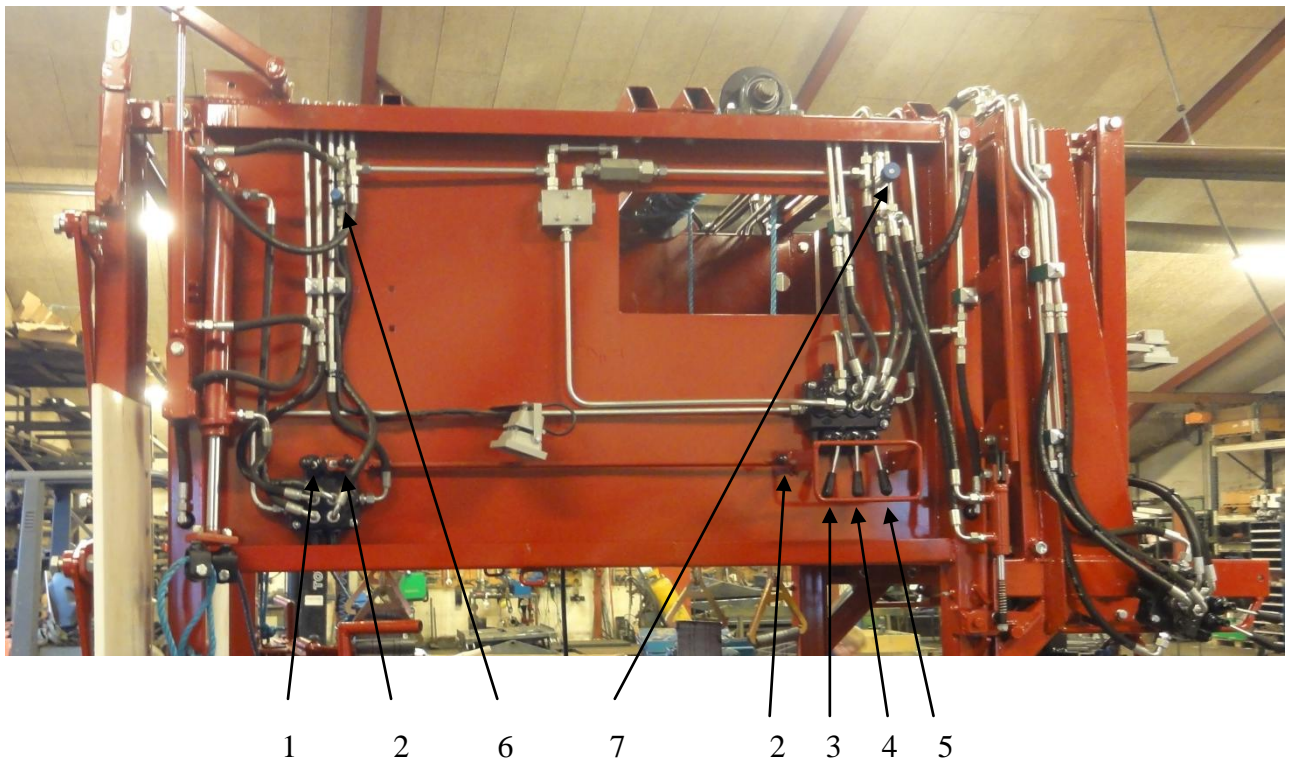

1. Hæve/sænke venstre forbensholder (Overtryksventil indstilles til 90 bar).
2. Åbne/lukke frontlågen.
3. Hæve/sænke klovbeskæringsboksen.
4. Hæve/sænke kreaturet.
5. Åbne og lukke baglågen.
6. Juster hastigheden på åbne/lukke funktionen af frontlågen.
7. Juster hastigheden på åbne funktionen af baglågen.

5.3. Bagende af boksen

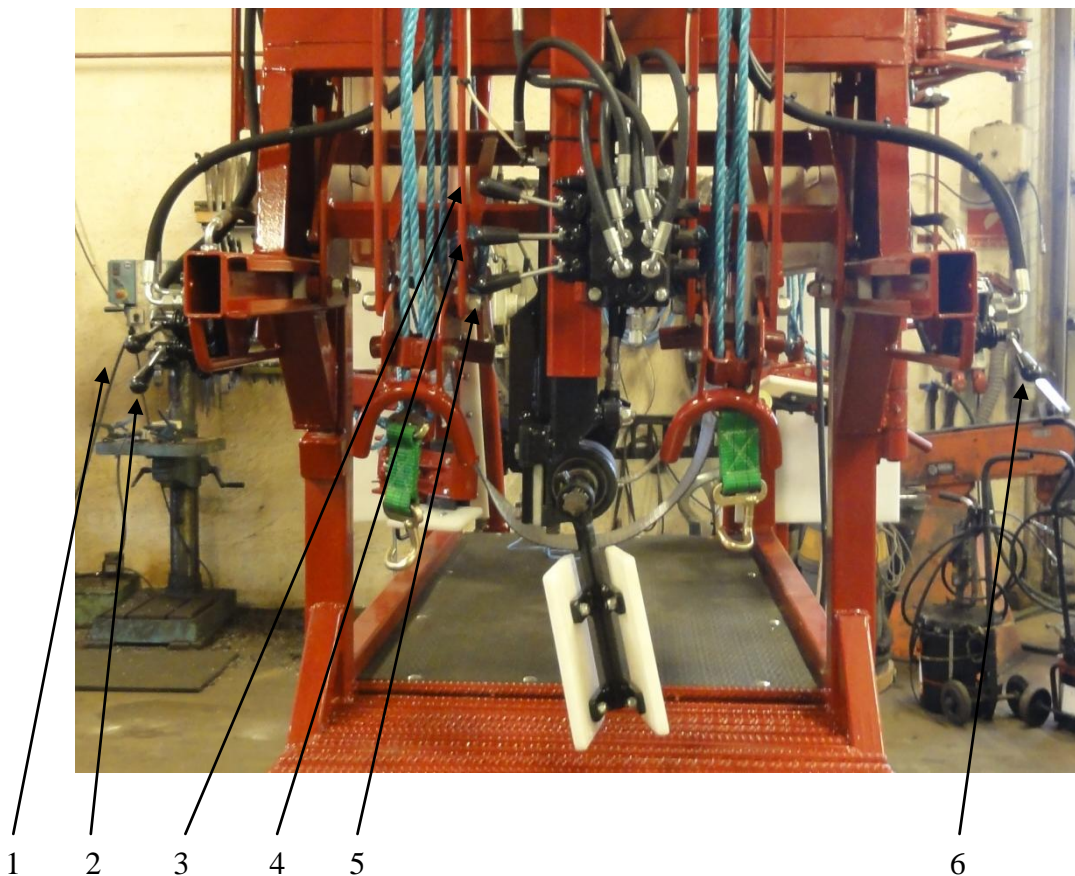

1. Hæve sænke reb med manchete til venstre bagben.
2. Juster bagbensholder frem og tilbage.
3. Klovstøtte op og ned.
4. Klovstøtte frem og tilbage.
5. Klovstøtte drej til højre og venstre.
6. Hæve sænke reb med manchete til højre bagben.

6. Sådan fungerer klovbeskæringsboksen

6.1. Klar til klovbeskæring

Start med at tilslutte strøm. Vinkelsliberen med klovklinge tilsluttes strømudtag ved kabelbøjle i toppen. Kontroller omløbsretningen for motor. Herefter åbnes frontlåge og baglåge. Kontroller at den bagerste sele er 5 cm højere end den forreste sele. Selerne køres ned og så er du klar til det første kreatur.

Overtryksventil ved tank indstilles til 110 bar.

6.2. Klovbeskæring

Før kreaturet ind i boksen og fang den med frontlågen, herefter lukkes baglågen, den kan også bruges til at skubbe kreaturet ind i boksen.

Boksen hæves op til en passende arbejds højde.

Sørg for at selerne er imellem forbenene og bagbenene. Hæv selerne indtil de støtter kreaturet godt under maven. Herefter sættes der en manchete omkring hver bagben og de løftes op i bagbensholderen. Klovstøtten drejes op under den ene klov og så er du klar til beskæring af den første klov. Herefter drejes klovstøtten over under den anden klov og så kan du beskære den anden klov. Fang forbenene med de to forbensholdere og træk rebet op så forbensholderen kommer ud på plads. Klovstøtten drejes op under kloven og så er forbenene klar til klovbeskæring.

Når alle fire klove er færdige løsnes forbensklovstøtten ved at trykke håndtaget på klovstøtten ned. Forbenet løsnes af forbensholderen og sættes ned på bunden af klovboksen. Det samme gøres ved det andet forben. Herefter sættes klovstøtten ved bagbenene lodret og begge reb med manchetter løsnes og manchetter tages af. Hvis kreaturet kommer til at ligge på bunden kan man løfte selerne lidt og sænke dem igen så kreaturet står ordentlig på benene. Så sænkes boksen helt ned og selerne sænkes helt ned på bunden. Frontlågen åbnes og kreaturet lukkes ud af boksen ved at åbne frontlågen. Baglågen åbnes og boksen er klar til et nyt kreatur.

7. Rengøring


Gør altid boksen ren efter brug. Skal boksen til en anden stald er det vigtig med en grundig rengøring. Skal boksen stå længere tid uden at blive brugt, så træk alle stempler ind så stempelstangen ikke ruste. Efter rengøring er det en god ide at sprøjte maskinen ind i olie. Det letter rengøringen næste gang.

8. Vedligehold

Smørrenipler smøres dagligt.

Hydraulikolie kontrolleres dagligt i glas og skiftes en gang årlig.

8.1. Skift slidt reb - forbensholder

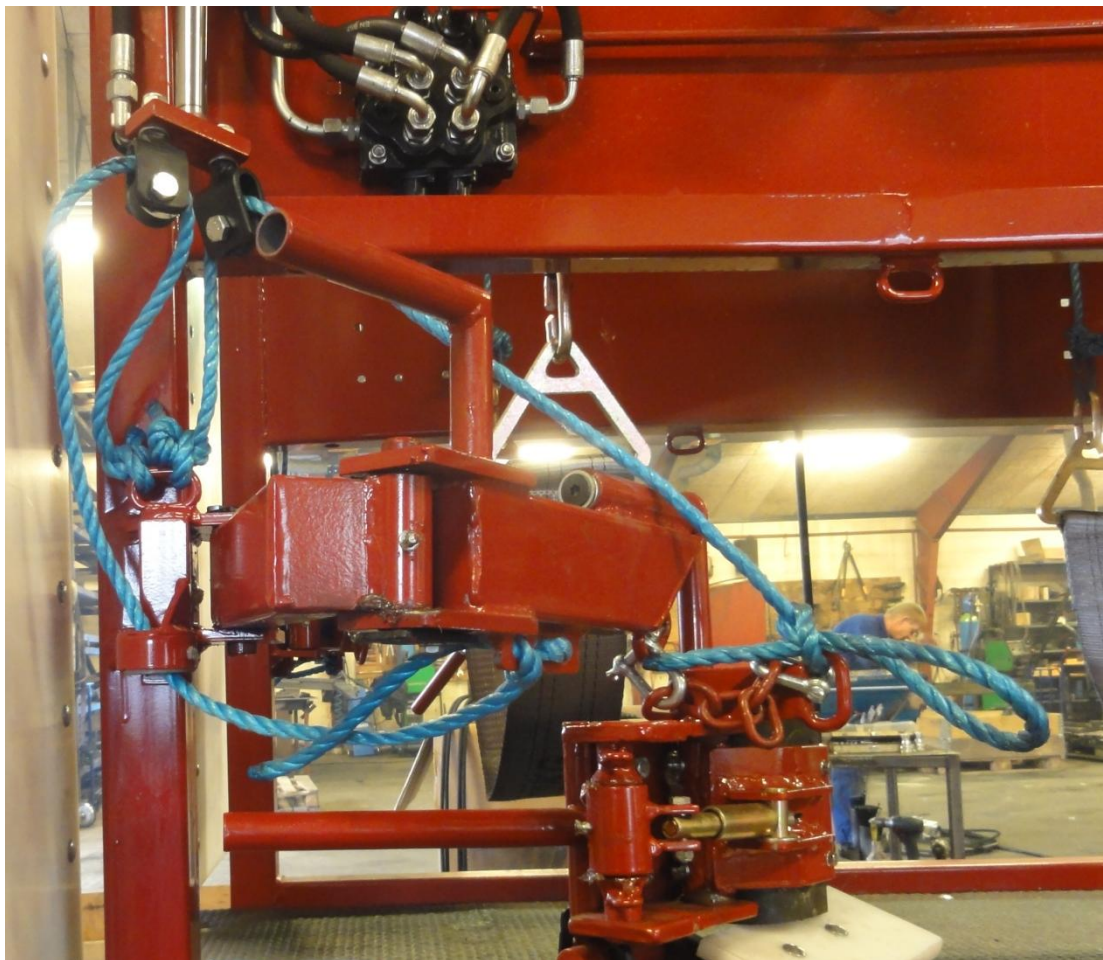

8.2. Skift slidt reb - manchete til bagben



9. Tekniske Data

Hydraulikolie	ca. 20 liter
Strømindtag	400 V
Kabelbøjle	230 V
Højde	2050 mm
Bredde	1300 mm
Længde	3000 mm
Vægt	1000 kg

10. Ekstra udstyr

- Hydraulisk trækjul

Vi forhandler klovklinger.

